

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Proteínas totales en orina

Información general

Código BK	PROTO
Código FONASA	309028
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	mg/24 horas
Días y hora de proceso	Lu a Vi 10:00
Principio del método	Colorimetría
Propósito del examen	Determinación cuantitativa de proteína total en orina. Se utiliza para confirmar mediante el hallazgo de proteínas en orina nefropatía primaria de origen glomerular, tubular o mixto
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de recolección de 24 horas
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Tiempo máximo de transporte	5 días
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	NaCl sobre 400 mmol/L, ceftriaxona sobre 550 mg/dL

Rango de referencia

Orina 24 horas : menos de 150 mg/24 horas

Método: Colorimetría